




# Schnellanleitung

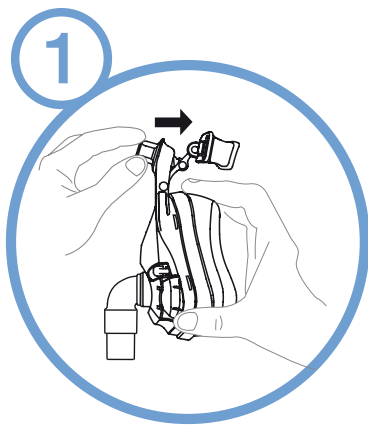

Stirnstütze mittels Drehknopf vollständig zum Patienten hinbewegen.

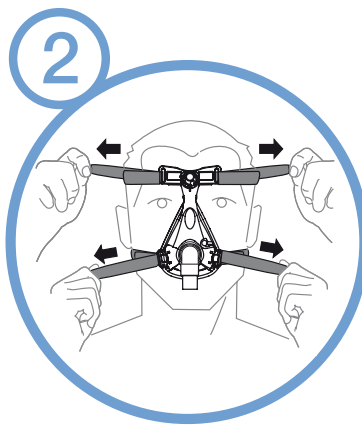

Kopfbänder nur leicht anlegen. Beatmung anschließen und Stirnstütze anpassen. Wenn nötig, Bänder nachkorrigieren.

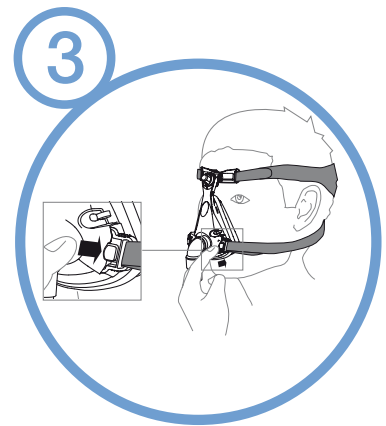

Einfaches Ablegen der Maske durch Schnellverschluss.

- biokompatibles medizinisches Silikon
- frei von Phtalaten
- frei von Latex

## Kompatibilität

	Monnal T50	Monnal T60	Monnal T75	Extend	Beatmung mit Expirationsventil	Leckage-Beatmung
Respireo Hospital Non Vented	✓	✓	✓	✓	✓	X
Respireo Hospital Vented	X	X	X	X	X	✓

## Artikelnummern

<b>KM222100</b>	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe S
<b>KM222200</b>	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe M
<b>KM222300</b>	Respireo Hospital F Non Vented Disposable – Größe L
<b>KM226400</b>	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe S
<b>KM226500</b>	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe M
<b>KM226600</b>	Respireo Hospital F Vented Disposable – Größe L

Respireo  
Hospital F  
Non Vented Disposable

Respireo  
Hospital F  
Vented Disposable



Bitte Gebrauchsanweisung sorgfältig lesen.  
Medizinprodukt Klasse IIa CE 0051.

Hergestellt durch Air Liquide Medical Systems Spa. Vertrieb durch Air Liquide Medical Systems SA.

# Respireo

## Hospital F

Non Vented Disposable



Einmalverwendung:  
bis zu 7 Tage  
pro Patient

Die Klinikmaske mit dem Komfort einer Homecaremaske




- ermöglicht nicht-invasive, komfortable Beatmung
- zeitsparende und sichere Anwendung durch wenige Komponenten
- Einwegartikel: erspart aufwändige hygienische Aufbereitung und Dokumentation
- in 3 Größen erhältlich
- Anpass-Schablone griffbereit auf der Verpackung
- Maske komplett mit Kopfband und Maskenkissen

# Respireo

## Hospital F

Vented Disposable

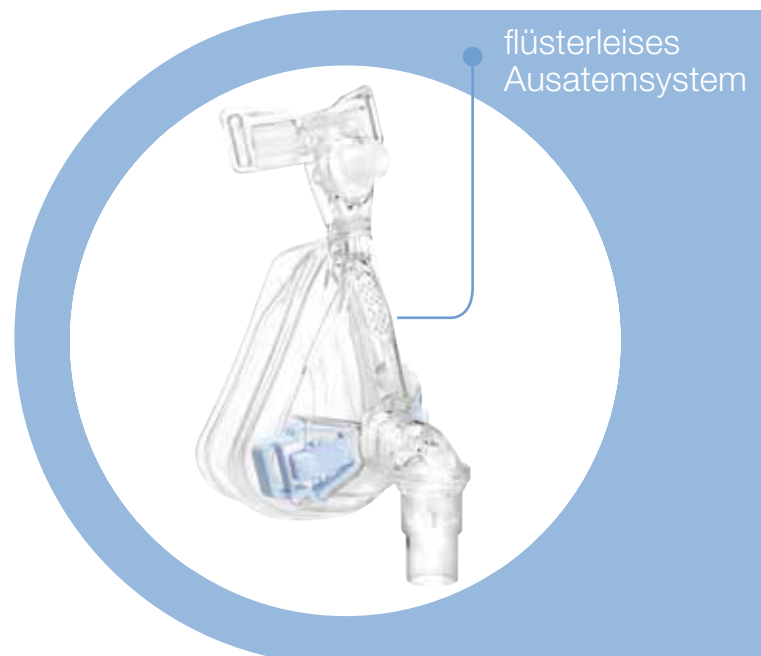

- Die bewährte Respireo Hospital F als **vented**-Version
- Identische einfache Anwendung (siehe Rückseite)